

INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE ŁÓŻKA DLA OIOM

UWAGI OGÓLNE

1. Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego należy przeprowadzić przegląd stanu technicznego urządzenia. Zaleca się założenie „Paszportu Technicznego” lub „Dziennika Aparatu” w którym rejestruje się wszelkie naprawy i przeglądy. Oba w/w dokumenty powinny znajdować się w miejscu użytkowania łóżka.
3. **Łóżko musi być podłączone do źródła zasilania zgodnie z tabliczką znamionową!**
4. Łóżko należy umieścić w odpowiedniej odległości od gniazdka sieci elektrycznej, w sposób nie utrudniający jego odłączenie od sieci zasilającej.
5. Ustawianie i użytkowanie łóżka powinno odbywać się na płaskich, poziomych powierzchniach tak, aby wszystkie kółka jezdne dotykały podłoża.
6. Eksploatacją łóżka dopuszczalna jest tylko w pomieszczeniach suchych.
7. Nie podłączać łóżka w miejscach gdzie występuje zagrożenie eksplozją!
8. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy korzystać wyłącznie z pomocy serwisu technicznego.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

1. Do pracy przy łóżku medycznym może być skierowany pracownik, który został dokładnie zapoznany z instrukcją obsługi urządzenia.
2. Instrukcja obsługi powinna znajdować się w miejscu użytkowania łóżka.
3. Przewód zasilający urządzenia nie może być przyciśnięty lub przygnieciony przedmiotami lub meblami.
4. Zwracać uwagę aby przewody prądowe nie znalazły się pomiędzy zawiasami podnóżka czy zagłówka co grozi awarią
5. Wszystkie przewody muszą być tak umieszczone aby nie uległy przetarciu i nie dotykały podłogi.
6. Przed każdym użytkowaniem łóżka sprawdzić i zablokować wszystkie cztery kółka jezdne.
7. Podczas regulacji podnóżka czy zagłówka nie należy wsuwać rąk pomiędzy materac a wspomniane części ze względu na ryzyko zranienia kończyn!
8. W trakcie czynności regulacyjnych i innych obsługowych zwracać uwagę aby żadna część ciała nie nałaża się w strefie potencjalnego uszkodzenia (ruchome: zagłówki, podnóżki, podnośniki, barierki itd.)
9. Przed rozpoczęciem przetaczania łóżka należy odłączyć przewód sieciowy oraz przewód wyrównania potencjałów.
10. Nie należy włączać urządzenia jeśli istnieje obawa, że nie działa ono prawidłowo.
11. Materiały eksploatacyjne urządzenia powinny być używane z dużą ostrożnością, wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta.
12. Podczas pracy urządzenia nie należy go podnosić lub przesuwować.
13. Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania po zakończeniu użytkowania.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W razie niebezpieczeństwa należy:

- zaprzestać dalszej pracy
- wyłączyć urządzenie przy pomocy wyłącznika
- wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego urządzenie
- odpowiednio zabezpieczyć urządzenie umieszczając na nim oznaczenie: „Uwaga awaria”!
- kontaktować się z wykwalifikowanym serwisem technicznym
- bezwzględnie unikać czynności naprawczych na własną rękę!

UWAGI KOŃCOWE

1. Zachować szczególną ostrożność podczas poruszania ruchomymi częściami łóżka (poręcze, segmenty itp.)
2. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, przy braku ochrony podstawowej oraz przy manipulowania w strefie obwodu napięcia urządzenia,
3. W trakcie prac montażowych, demontażowych oraz eksploatacyjnych istnieje szczególne niebezpieczeństwo uszkodzenia rąk
4. Nie wolno obciążać łóżka powyżej dopuszczalnej wartości
5. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłaszać swojemu przełożonemu a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.

Dział Ochrony Pracy i Środowiska

<http://ochronapracy.wum.edu.pl>