

INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE POMPY INFUZYJNEJ

UWAGI OGÓLNE

1. Przed przystąpieniem do pracy z pompą infuzyjną należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi celem zapewnienia płynnego przebiegu pracy oraz uniknięcia uszkodzeń tego urządzenia lub jego elementów.
2. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego należy przeprowadzić przegląd stanu technicznego urządzenia. Zaleca się założenie „Paszportu Technicznego” lub „Dziennika Aparatu” w którym rejestruje się wszelkie naprawy i przeglądy. Oba w/w dokumenty powinny znajdować się w miejscu użytkowania pompy infuzyjnej.
3. Przewód zasilający urządzenia powinien być podłączony do gniazda z kołkiem uziemiającym.
4. Pompa infuzyjna powinna być ustawiona w miejscu o niezbyt wysokiej temperaturze, bez kurzu, wibracji i bezpośredniego światła słonecznego, łatwopalnego gazu produktów tlenowych i aerosolowych w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilającego oraz z zachowaniem minimum 30 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia.
5. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy korzystać wyłącznie z pomocy serwisu technicznego.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

1. Do pracy przy pompie infuzyjnej może być skierowany pracownik lub student pod opieką lekarza lub wykwalifikowanego personelu medycznego, który został dokładnie zapoznany z instrukcją obsługi urządzenia lub został przeszkolony przez autoryzowany personel firmy oraz posiada niezbędne medyczne kwalifikacje do wykonywania tego typu czynności.
2. Instrukcja obsługi powinna znajdować się w miejscu użytkowania pompy infuzyjnej.
3. Przewód zasilający urządzenia nie może być przyciśnięty lub przygnieciony przedmiotami lub meblami.
4. Nie należy włączać urządzenia jeśli istnieje obawa, że nie działa ono prawidłowo.
5. Nie należy pozostawiać urządzenia włączonego bez nadzoru.
6. Materiały eksploatacyjne urządzeń powinny być używane z dużą ostrożnością, wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta.
7. Podczas pracy urządzenia nie należy go podnosić lub przesuwac.
8. Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania po zakończeniu użytkowania.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W razie niebezpieczeństwa należy:

- zaprzestać dalszej pracy
- wyłączyć urządzenie przy pomocy wyłącznika
- wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego urządzenie
- odpowiednio zabezpieczyć urządzenie umieszczając na nim oznaczenie: „Uwaga awaria”!
- kontaktować się z wykwalifikowanym serwisem technicznym
- bezwzględnie unikać czynności naprawczych na własną rękę!

UWAGI KOŃCOWE

1. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłaszać swojemu przełożonemu a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
2. Maksymalny poziom hałasu wytwarzanego przez pompę infuzyjną nie może przekraczać 70 dB (A) – według normy ISO-7779.

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA

- zagrożenie porażenie prądem elektrycznym, przy braku ochrony podstawowej oraz przy manipulowania w strefie obwodu napięcia urządzenia,