

INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE SSAKA MEDYCZNEGO (ASPIRATORA)

UWAGI OGÓLNE

1. Przed podjęciem próby włączenia aspiratora należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi celem zapewnienia płynnego przebiegu pracy oraz uniknięcia uszkodzeń tego urządzenia lub jego elementów.
2. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego należy przeprowadzić przegląd stanu technicznego urządzenia. Zaleca się założenie „Paszportu Technicznego” lub „Dziennika Aparatu” w którym rejestruje się wszelkie naprawy i przeglądy. Oba w/w dokumenty powinny znajdować się w miejscu użytkowania aspiratora.
3. Przewód zasilający urządzenia powinien być podłączony do gniazda z kołkiem uziemiającym.
4. Aspirator powinien być ustawiony w miejscu o niezbyt wysokiej temperaturze (5-35°C), bez kurzu, źródeł ciepła, wody, wibracji i bezpośredniego światła słonecznego w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka zasilającego oraz z zachowaniem minimum 50 cm wolnej przestrzeni wokół.
5. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy korzystać wyłącznie z pomocy serwisu technicznego

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

1. Do pracy przy aspiratorze może być skierowany pracownik lub student pod opieką lekarza lub wykwalifikowanego personelu medycznego, który został dokładnie zapoznany z instrukcją obsługi urządzenia.
2. Instrukcja obsługi powinna być łatwo dostępna i znajdować się w miejscu użytkowania aspiratora.
3. Przewód zasilający urządzenia nie może być przyciśnięty lub przygnieciony przedmiotami lub meblami.
4. Nie należy włączać aspiratora jeśli istnieje obawa, że nie działa on prawidłowo.
5. Usytuowanie aspiratora musi umożliwiać swobodny dostęp oraz łatwą obsługę.
6. Materiały eksploatacyjne urządzenia powinny być używane z dużą ostrożnością, wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta.
7. Podczas pracy urządzenia nie należy go podnosić, przesuwac lub opierać się o niego.
8. Urządzenie należy wyłączyć po zakończeniu pracy oraz gdy nastąpi zanik napięcia w sieci podczas pracy.
9. Na czas długiego przestoju (urlop, weekend) urządzenie należy wyłączyć z sieci.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W razie niebezpieczeństwa należy:

- zaprzestać dalszej pracy
- wyłączyć urządzenie przy pomocy wyłącznika
- wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego urządzenie
- odpowiednio zabezpieczyć urządzenie umieszczając na nim oznaczenie: „Uwaga awaria”!
- kontaktować się z wykwalifikowanym serwisem technicznym
- bezwzględnie unikać czynności naprawczych na własną rękę!

UWAGI KOŃCOWE

1. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłaszać swojemu przełożonemu a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
2. Maksymalny poziom hałasu wytwarzanego przez aspirator nie może przekraczać 70 dB (A) – według normy ISO-7779.

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA

- zagrożenie porażenie prądem elektrycznym, przy braku ochrony podstawowej oraz przy manipulowania w strefie obwodu napięcia wytrząsarki,
- zagrożenia urazowe przy manipulacjach od ruchomych elementów maszyny,