

INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE STANOWISKA DO RESUSCYTACJI NOWORODKA

UWAGI OGÓLNE

1. Przed podjęciem próby włączenia stanowiska do resuscytacji należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi celem zapewnienia płynnego przebiegu pracy oraz uniknięcia uszkodzeń tego urządzenia lub jego elementów.
2. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego należy przeprowadzić przegląd stanu technicznego urządzenia. Zaleca się założenie „Paszportu Technicznego” lub „Dziennika Aparatu” w którym rejestruje się wszelkie naprawy i przeglądy. Oba w/w dokumenty powinny znajdować się w miejscu użytkowania urządzenia
3. Przewód zasilający stanowisko powinien być podłączony do gniazda z kołkiem uziemiającym.
4. Stanowisko powinno być ustawione na równym i stabilnym podłożu, bez kurzu, wibracji i bezpośredniego światła słonecznego, łatwopalnego gazu, środków czyszczących, w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilającego.
5. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy korzystać wyłącznie z pomocy serwisu technicznego

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

1. Do użytkowania stanowiska do resuscytacji może być skierowany pracownik lub student pod opieką lekarza lub wykwalifikowanego personelu medycznego, który został dokładnie zapoznany z instrukcją obsługi urządzenia.
2. Instrukcja obsługi powinna znajdować się w miejscu użytkowania urządzenia.
3. Przewód zasilający urządzenia nie może być przyciśnięty lub przygnieciony przedmiotami lub meblami.
4. Nie dotykać promiennika lub kratki osłaniającej – ryzyko poparzenia!
5. Przed przystąpieniem do przemieszczania urządzenia lub dezynfekcji należy odłączyć je od sieci elektrycznej.
6. Nie należy włączać urządzenia jeśli istnieje obawa, że nie działa ono prawidłowo.
7. Nie należy pozostawiać urządzenia włączonego bez nadzoru
8. Materiały eksploatacyjne urządzeń powinny być używane z dużą ostrożnością, wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta.
9. Stanowiska do resuscytacji należy odłączyć od źródła zasilania po zakończeniu użytkowania.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W razie niebezpieczeństwa należy:

- zaprzestać dalszej pracy
- wyłączyć urządzenie przy pomocy wyłącznika
- wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego urządzenie
- odpowiednio zabezpieczyć urządzenie umieszczając na nim oznaczenie: „Uwaga awaria”!
- kontaktować się z wykwalifikowanym serwisem technicznym
- bezwzględnie unikać czynności naprawczych na własną rękę!

UWAGI KOŃCOWE

1. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłaszać swojemu przełożonemu a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
2. Maksymalny poziom hałasu wytwarzanego przez stanowisko nie może przekraczać 70 dB (A) – według normy ISO-7779.

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA

- zagrożenie porażenie prądem elektrycznym, przy braku ochrony podstawowej oraz przy manipulowania w strefie obwodu napięcia urządzenia,
- Zagrożenie poparzeniem w przypadku dotknięcia promiennika lub kratki osłaniającej.