

INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE APARATU DO ZNIECZULENIA

UWAGI OGÓLNE

1. Przed rozpoczęciem stosowania systemu należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi celem zapewnienia płynnego przebiegu pracy oraz uniknięcia uszkodzeń tego urządzenia lub jego elementów.
2. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego należy przeprowadzić przegląd stanu technicznego urządzenia. Zaleca się założenie „Paszportu Technicznego” lub „Dziennika Aparatu” w którym rejestruje się wszelkie naprawy i przeglądy. Oba w/w dokumenty powinny znajdować się w miejscu łatwo dostępnym w pobliżu miejsca użytkowania urządzenia.
3. Przewód zasilający urządzenia powinien być podłączony do gniazda z kołkiem uziemiającym.
4. Aparat powinien być ustawiony w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka zasilającego oraz z zachowaniem wolnej przestrzeni wokół obudowy.
5. Należy podłączać wyłącznie końcówki przeznaczone do danego urządzenia.
6. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy korzystać wyłącznie z pomocy serwisu technicznego.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

1. Do pracy przy obsłudze aparatu do znieczulenia może być skierowany pracownik, który został dokładnie zapoznany z instrukcją obsługi urządzenia oraz zasadami bezpiecznej pracy oraz posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego typu czynności..
2. Instrukcja obsługi powinna znajdować się w miejscu łatwo dostępnym w pobliżu urządzenia.
3. Przewód zasilający urządzenia nie może być przyciśnięty lub przygnieciony przedmiotami lub meblami.
4. Nie należy włączać systemu, jeśli istnieje obawa, że nie jest prawidłowo zainstalowany.
5. Wzrokowo skontroluj wszystkie przewody zasilające. Nie włączaj zasilania, jeżeli przewód jest uszkodzony lub wykazuje cechy zużycia.
6. Przed rozpoczęciem stosowania systemu należy upewnić się, że elementy składowe są prawidłowo podłączone a wyposażenie jest nieuszkodzone.
7. Przed rozpoczęciem stosowania systemu należy upewnić się, że hamulec jest ustawiony we właściwej pozycji w celu unieruchomienia urządzenia.
8. Stosowanie telefonów przenośnych lub innej aparatury będącej źródłem częstotliwości radiowych może być przyczyną zakłóceń w działaniu aparatu
9. System nie jest przeznaczony do użytku w otoczeniu, w którym stężenie tlenu przekracza 25%. Zwiększone stężenia tlenu może skutkować większym ryzykiem pożaru.
10. Materiały eksploatacyjne urządzenia powinny być używane z dużą ostrożnością, wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta.
11. Na czas długiego przestoju (urlop, weekend) urządzenie należy wyłączyć z sieci i odpowiednio zabezpieczyć.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W razie niebezpieczeństwa należy:

- zaprzestać dalszej pracy
- wyłączyć urządzenie przy pomocy wyłącznika
- wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego urządzenie
- odpowiednio zabezpieczyć urządzenie umieszczając na nim oznaczenie: „Uwaga awaria”!
- kontaktować się z wykwalifikowanym serwisem technicznym
- bezwzględnie unikać czynności naprawczych na własną rękę!

UWAGI KOŃCOWE

1. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłaszać swojemu przełożonemu a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
2. W celu uniknięcia nieprzewidzianych wypadków aparat do znieczulenia powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, przy braku ochrony podstawowej oraz przy manipulowania w strefie obwodu napięcia ,
- zagrożenia urazowe przy manipulacjach od ruchomych elementów urządzenia

Dział Ochrony Pracy i Środowiska

<http://ochronapracy.wum.edu.pl>