

# INSTRUKCJA BHP

## PRZY OBSŁUDZE RESPIRATORA

### UWAGI OGÓLNE

1. Przed rozpoczęciem stosowania aparatu należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi celem zapewnienia płynnego przebiegu pracy oraz uniknięcia uszkodzeń tego urządzenia lub jego elementów.
2. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego należy przeprowadzić przegląd stanu technicznego urządzenia. Zaleca się założenie „Paszportu Technicznego” lub „Dziennika Aparatu” w którym rejestruje się wszelkie naprawy i przeglądy. Oba w/w dokumenty powinny znajdować się w miejscu łatwo dostępnym w pobliżu miejsca użytkowania urządzenia.
3. Przewód zasilający urządzenia powinien być podłączony do gniazda z kołkiem uziemiającym.
4. Urządzenie musi być podłączone do źródła zasilania zgodnie z tabliczką znamionową!
5. Aparat powinien być ustawiony w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka zasilającego oraz z zachowaniem wolnej przestrzeni wokół obudowy.
6. Należy podłączać wyłącznie końcówki przeznaczone do danego urządzenia.
7. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy korzystać wyłącznie z pomocy serwisu technicznego.

### PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

1. Respirator może być stosowany w szpitalach, placówkach służby zdrowia i w transporcie wewnątrzzpitalnym.
2. Do pracy przy obsłudze respiratora może być skierowany pracownik, który został dokładnie zapoznany z instrukcją obsługi urządzenia oraz zasadami bezpiecznej pracy oraz posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego typu czynności.
3. Instrukcja obsługi powinna znajdować się w miejscu łatwo dostępnym w pobliżu urządzenia.
4. Przewód zasilający urządzenia nie może być przyciśnięty lub przygnieciony przedmiotami lub meblami.
5. Nie należy włączać aparatu jeśli istnieje obawa, że nie jest prawidłowo zainstalowany.
6. Wzrokowo skontroluj wszystkie przewody zasilające. Nie włączaj zasilania, jeżeli przewód jest uszkodzony lub wykazuje cechy zużycia.
7. Przed rozpoczęciem stosowania aparatu należy upewnić się, że elementy składowe są prawidłowo podłączone a wyposażenie jest nieuszkodzone.
8. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w obecności gazów anestetycznych.
9. Gazem źródłowym tlenu musi być czysty tlen medyczny.
10. Należy zaprzestać użytkowania w przypadku zachłapania lub zalania urządzenia.
11. Nie stawiać cieczy na respiratorze lub w jego pobliżu.
12. Nie spryskiwać bezpośrednio przedniego ani tylnego panelu respiratora środkami czyszczącymi
13. Nie zanurzać respiratora w płynach sterylizujących ani żadnych innych cieczach
14. Urządzenie wytwarza fale radiowe, używa ich i może je emitować. Fale te mogą powodować zakłócenia w działaniu innych urządzeń znajdujących się w pobliżu,
15. Materiały eksploatacyjne urządzenia powinny być używane z dużą ostrożnością, wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta.
16. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub dezynfekcji urządzenia należy odłączyć je od gniazda zasilania wraz z pozostałymi kablami i wyjąć akumulatory.
17. W przypadku konieczności wymiany akumulatora (odpady niebezpieczne) należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.
18. Nie należy otwierać urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Wszelkie ingerencje mechaniczne może dokonywać tylko wykwalifikowany personel techniczny.
19. Na czas długiego przestoju (urlop, weekend) urządzenie należy wyłączyć z sieci i odpowiednio zabezpieczyć.

## POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W razie niebezpieczeństwa należy:

- zaprzestać dalszej pracy
- wyłączyć urządzenie przy pomocy wyłącznika
- wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego urządzenie
- odpowiednio zabezpieczyć urządzenie umieszczając na nim oznaczenie: „Uwaga awaria”!
- kontaktować się z wykwalifikowanym serwisem technicznym
- **bezwzględnie unikać czynności naprawczych na własną rękę!**

## UWAGI KOŃCOWE

1. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłaszać swojemu przełożonemu a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
2. W celu uniknięcia nieprzewidzianych wypadków respirator powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych

## ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, przy braku ochrony podstawowej oraz przy manipulowania w strefie obwodu napięcia.
- zagrożenia urazowe przy manipulacjach od ruchomych elementów urządzenia

---

***Dział Ochrony Pracy i Środowiska***

<http://ochronapracy.wum.edu.pl>