

INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE APARATU DO USG

UWAGI OGÓLNE

1. Przed włączeniem systemu ultradźwiękowego należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi celem zapewnienia płynnego przebiegu pracy oraz uniknięcia uszkodzeń tego urządzenia lub jego elementów.
2. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego należy przeprowadzić przegląd stanu technicznego urządzenia. Zaleca się założenie „Paszportu Technicznego” lub „Dziennika Aparatu” w którym rejestruje się wszelkie naprawy i przeglądy. Oba w/w dokumenty powinny znajdować się w miejscu łatwo dostępnym w pobliżu miejsca użytkowania urządzenia.
3. Przewód zasilający urządzenia powinien być podłączony do gniazda z kołkiem uziemiającym.
4. Aparat powinien być ustawiony w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka zasilającego oraz z zachowaniem wolnej przestrzeni wokół obudowy celem zapewnienia swobodnego przepływu powietrza wokół niej.
5. Należy podłączać wyłącznie końcówki przeznaczone do danego urządzenia.
6. Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, operatorów i innych osób, kontrolę sprzętu należy przeprowadzać co 24 miesiące. Konserwację systemu musi wykonywać wykwalifikowany autoryzowany przedstawiciel firmy Siemens
7. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy korzystać wyłącznie z pomocy serwisu technicznego.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

1. Do pracy przy obsłudze aparatu do USG może być skierowany pracownik, który został dokładnie zapoznany z instrukcją obsługi urządzenia oraz zasadami bezpiecznej pracy oraz posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego typu czynności.
2. Instrukcja obsługi powinna znajdować się w miejscu łatwo dostępnym w pobliżu urządzenia.
3. Przewód zasilający urządzenia nie może być przyciśnięty lub przygnieciony przedmiotami lub meblami.
4. Nie należy włączać aparatu do jeśli istnieje obawa, że nie jest prawidłowo zainstalowany.
5. Aby zapobiec porażeniu prądem, przed użyciem należy wzrokowo skontrolować przetwornik. Nie używaj przetwornika z pękniętą, przedziurawioną lub przebarwioną obudową albo z uszkodzonym przewodem.
6. Wzrokowo skontroluj wszystkie przewody zasilające. Nie włączaj zasilania, jeżeli przewód jest postrzępiony, rozdarty lub wykazuje cechy zużycia.
7. Korzystanie z przedłużaczy lub listew zasilających w celu zasilania systemu USG może wpłynąć negatywnie na uziemienie systemu i spowodować przekroczenie limitów dotyczących prądu upływu
8. Przed każdorazowym użyciem aparatu należy sprawdzić jego stan techniczny.
9. Materiały eksploatacyjne urządzenia powinny być używane z dużą ostrożnością, wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta.
10. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub dezynfekcji urządzenia należy odłączyć je od gniazda zasilania.
11. Na powierzchnię systemu ultradźwiękowego nie wolno wylewać żadnych płynów.
12. Na czas długiego przestoju (urlop, weekend) urządzenie należy wyłączyć z sieci i odpowiednio zabezpieczyć.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W razie niebezpieczeństwa należy:

- zaprzestać dalszej pracy
- wyłączyć urządzenie przy pomocy wyłącznika
- wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego urządzenie
- odpowiednio zabezpieczyć urządzenie umieszczając na nim oznaczenie: „Uwaga awaria”!
- kontaktować się z wykwalifikowanym serwisem technicznym
- bezwzględnie unikać czynności naprawczych na własną rękę!

UWAGI KOŃCOWE

1. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłaszać swojemu przełożonemu a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
2. W celu uniknięcia nieprzewidzianych wypadków aparat do USG powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, przy braku ochrony podstawowej oraz przy manipulowania w strefie obwodu napięcia ,

Dział Ochrony Pracy i Środowiska

<http://ochronapracy.wum.edu.pl>