

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP

Symulator Pacjenta Wysokiej Wierności

1. Cel i zakres instrukcji

Instrukcja określa zasady bezpiecznego użytkowania, obsługi oraz konserwacji symulatora pacjenta wysokiej wierności w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, sprzętu oraz otoczenia. Dotyczy wszystkich osób korzystających z symulatora: studentów, instruktorów, techników i pracowników ośrodka.

2. Zagrożenia występujące na stanowisku

- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Ryzyko uszkodzenia symulatora przy nieprawidłowym użytkowaniu.
- Możliwość poślizgnięcia lub potknięcia się o kable i przewody.
- Ryzyko oparzenia lub zadrapania podczas konserwacji sprzętu.
- Stres szkoleniowy u uczestników scenariuszy.

3. Wymagania dla użytkowników

Użytkownik musi być przeszkolony z obsługi symulatora, znać instrukcję obsługi urządzenia, stosować się do poleceń instruktora lub technika symulacji, dbać o czystość i porządek na stanowisku pracy.

4. Zasady bezpiecznej pracy

Przed rozpoczęciem pracy: sprawdzić stan techniczny, poprawność podłączeń, ułożenie przewodów, warunki otoczenia.

W trakcie pracy: nie dotykać przewodów mokrymi rękami, nie dopuszczać do zalania symulatora, nie używać nadmiernej siły, zgłaszać problemy techniczne, stosować rękawiczki.

Po zakończeniu pracy: wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania, oczyścić manekina, zgłosić usterki.

5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- Porażenie prądem – odłączyć zasilanie, wezwać pomoc (112).
- Zalanie lub pożar – nie dotykać sprzętu, odłączyć prąd, użyć gaśnicy CO₂ lub proszkowej.
- Uszkodzenie symulatora – zaprzestać pracy, powiadomić technika.
- Uraz uczestnika – udzielić pierwszej pomocy, powiadomić przełożonego.

6. Środki ochrony indywidualnej

Rękawiczki jednorazowe, fartuch ochronny, maseczka i okulary ochronne (w razie potrzeby).

7. Odpowiedzialność

Każdy użytkownik odpowiada za przestrzeganie zasad BHP, właściwe obchodzenie się z symulatorem, zgłaszanie nieprawidłowości oraz zachowanie porządku na stanowisku.

8. Postanowienia końcowe

Zabronione jest samodzielne otwieranie obudów i ingerencja w układy elektryczne. Wszelkie prace serwisowe wykonuje autoryzowany technik lub producent. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszą instrukcją oraz potwierdzenia tego podpisem.

W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

- o Pogotowie ratunkowe: 999
- o Straż pożarna: 998
- o Numer alarmowy: 112

Dział Ochrony Pracy i Środowiska

<http://ochronapracy.wum.edu.pl>