

INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI UNITU STOMATOLOGICZNEGO

CEL

1. Unit stomatologiczny musi być zainstalowany przez wykwalifikowany serwis.
2. Czynności związane z obsługą urządzeń stomatologicznych wykonuje osoba do tego uprawniona
3. Należy stosować środki ochrony indywidualnej przed, w trakcie i po zakończeniu wykonywanych czynności przy użyciu urządzenia.
4. Czynności związane z obsługą urządzeń stomatologicznych wykonuje osoba do tego uprawniona.
5. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Do pracy przy obsłudze unitu stomatologicznego może być skierowany pracownik/student, który został dokładnie zapoznany z instrukcją obsługi urządzenia.
2. Wcisnąć wyłącznik główny zlokalizowany na obudowie podstawy fotela (lampa kontrolna zapala się).
3. W momencie włączania unitu narzędzia powinny pozostawać na swoich miejscach, sterownik nożny powinien znajdować się w pozycji zerowej, a przyciski klawiatury nie powinny być wciśnięte.
4. Przewód zasilający nie może być przyciśnięty lub przygnieciony przedmiotami lub innymi urządzeniami lub meblami.
5. Nieprawidłowa obsługa może poważnie uszkodzić urządzenie.
6. Nigdy nie wolno dokonywać napraw samodzielnie.
7. W przypadku stwierdzonego uszkodzenia urządzenia należy skontaktować się z serwisem w celu sprawdzenia i naprawy w razie potrzeby.
8. W przypadku stwierdzenia awarii urządzenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania a następnie skontaktować się z serwisem technicznym.
9. Unit można wyposażyć tylko w jeden rodzaj mikrosilnika
10. Urządzenie należy podłączyć do sieci z uziemieniem ochronnym.
11. Do linii zasilającej unitu nie należy podłączać innych urządzeń

CZYNNOŚCI W TRAKCIE WYKONYWANIA PRACY

1. Uzupełnianie wody- butla z wodą destylowaną znajduje się wewnątrz bloku spluwaczki i jest dostępna po otwarciu drzwiczek bloku spluwaczki:
 - wyłącznik główny ustawić w pozycji „0”
 - otworzyć drzwiczki bloku spluwaczki
 - odkręcić butlę celem uzupełnienia wodą destylowaną,
 - dokręcić butlę tak, aby w czasie pracy nie uchodziło z niej sprężone powietrze
 - wyłącznik główny ustawić w pozycji „I”
 - sprawdzić czy z butli nie uchodzi powietrze.
 - zamknąć drzwiczki.
2. Ślinociąg po wyjęciu z uchwytu ślinociąg włącza się automatycznie.
3. System ssący po wyciągnięciu z uchwytu system ssący załącza się automatycznie.
4. Lampa polimeryzacyjna Po wyciągnięciu z uchwytu lampa polimeryzacyjna jest gotowa do pracy.

5. Sterowanie fotelem stomatologicznym zachodzi poprzez przyciski funkcyjne zlokalizowane na stoliku lekarza oraz za pomocą wielofunkcyjnego sterownika nożnego (UNO/NOK) lub sterownika nożnego fotela.
6. Reżim pracy – ciągły z przerwami, typowy dla praktyki stomatologicznej.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIA PRACY

1. Zewnętrzne powierzchnie unitu stomatologicznego można czyścić wilgotną ściereczką.
2. Zalecanym środkiem czyszczącym jest środkiem dezynfekcyjny przeznaczony do czyszczenia powierzchni unitu należy stosować przynajmniej raz dziennie oraz gdy unit został skażony materiałem biologicznym.
3. Producent zaleca przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych co 6 miesięcy. Przeglądy zawsze należy zlecać autoryzowanemu serwisowi, który ma obowiązek potwierdzić ich przeprowadzenie w karcie gwarancyjnej

UWAGI KOŃCOWE

1. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją.
2. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu\prowadzącemu, a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
3. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników\studentów jednostki organizacyjnej.

W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

- o Pogotowie ratunkowe: 999
- o Straż pożarna: 998
- o Numer alarmowy: 112