

INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI PODNOŚNIKA PACJENTA

1. Przeznaczenie urządzenia.

Podnośnik pacjenta służy do bezpiecznego przemieszczania osób z ograniczoną mobilnością lub studenta pod opieką lekarza lub wykwalifikowanego personelu , np. z łóżka na wózek, z wózka do wanny itp.

2. Warunki dopuszczenia do obsługi

- Pracownik lub student pod opieką lekarza lub wykwalifikowanego personelu medycznego w zakresie obsługi podnośnika pacjenta.
- Znajomość instrukcji producenta danego modelu.
- Dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego pracownika.
- Stosowanie odzieży roboczej zgodnie z przepisami BHP.

3. Zagrożenia przy pracy z podnośnikiem

- Ryzyko upadku studenta.
- Zgniecenia i urazy kończyn przy niewłaściwym montażu zawiesia.
- Przeciążenie urządzenia.
- Ryzyko kolizji z przeszkodami w otoczeniu.
- Ryzyko porażenia prądem (w przypadku urządzeń elektrycznych).

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

4.1. Sprawdzenie stanu technicznego podnośnika:

- Stan kółek (blokady, zużycie).
- Stan zawiesia (brak przetarć, rozdarć).
- Naładowanie baterii (dla modeli elektrycznych).

4.2. Sprawdzenie dopuszczalnego obciążenia urządzenia.

4.3. Zapewnienie miejsca do swobodnego manewrowania.

5. Sposób prawidłowego użytkowania

- Ustawić podnośnik jak najbliżej studenta.
- Zamontować zawiesie zgodnie z instrukcją (pod uda i plecy).
- Upewnić się, że zawiesie jest stabilne i bezpieczne.
- Powoli unosić studenta, obserwując jego reakcję.

- Przemieszczać podnośnik z zachowaniem ostrożności.
- Opuścić studenta w nowym miejscu i zdjąć zawiesie.

6. Czynności po zakończeniu pracy

- Odłączyć urządzenie od zasilania (jeśli dotyczy).
- Oczyszczyć i zdezynfekować powierzchnie mające kontakt z człowiekiem.
- Sprawdzić stan zawiesia i schować je w wyznaczone miejsce.
- Zgłosić wszelkie usterki przełożonemu.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie awarii – natychmiast przerwać pracę.
- Użyć mechanicznego systemu awaryjnego opuszczania (jeśli jest).
- Zabezpieczyć osobę i wezwać pomoc.
- Zgłosić awarię odpowiedzialnej osobie.

8. Uwagi końcowe

- Nie należy nigdy zostawiać pacjenta bez opieki w trakcie unoszenia.
- Nie wolno przewozić osób podnośnikiem na większe odległości.
- Regularnie przeprowadzać przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta.

Dział Ochrony Pracy i Środowiska

<http://ochronapracy.wum.edu.pl>