

INSTRUKCJA BHP DOTYCZĄCA OBSŁUGI RETOSKOPU

1. Przeznaczenie urządzenia

Retoskop jest urządzeniem medycznym służącym do bezpośredniego oglądania błony śluzowej w tym odbytnicy i końcowego odcinka jelita grubego. Umożliwia wykonanie badań diagnostycznych, biopsji oraz zabiegów leczniczych.

2. Warunki dopuszczenia do obsługi

- Badanie może być przeprowadzane tylko pod opieką lekarza lub wykwalifikowanego personelu medycznego.
- Osoba obsługująca musi być pod opieką lekarza lub wykwalifikowanego personelu medycznego przeszkolonego w zakresie używania rektoskopu oraz znać jego budowę i zasady działania.
- Koniecznym jest przekazanie studentom zasad aseptyki i antyseptyki.

3. Zagrożenia związane z obsługą rektoskopu

- Możliwość zakażenia przy niewłaściwej dezynfekcji sprzętu.
- Porażenie prądem elektrycznym (w przypadku modeli z własnym oświetleniem lub insuflatorem).
- Oparzenia światłowodowe (przy źle odłączonym przewodzie światła).

4. Środki ochrony indywidualnej

- Rękawiczki jednorazowe.
- Maski chirurgiczne.
- Fartuch ochronny.
- Osłona twarzy (opcjonalnie – przy kontakcie z płynami ustrojowymi).

5. Czynności przed rozpoczęciem badania

1. Sprawdzenie kompletności zestawu rektoskopowego (tuba, źródło światła, insuflator).
2. Sprawdzenie stanu technicznego i czystości urządzenia.
3. Sprawdzenie działania źródła światła i przepływu powietrza.
4. Przygotowanie sprzętu zgodnie z zasadami aseptyki.

6. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Delikatnie wprowadzać rektoskop zgodnie z kierunkiem anatomicznym odbytnicy.
- Nie stosować nadmiernego ciśnienia podczas insuflacji powietrza.

- Nie dotykać elementów świetlnych gołą ręką.

7. Czynności po zakończeniu badania

- Zdezynfekować urządzenie zgodnie z procedurą.
- Oczyszczyć i sprawdzić wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń.
- Zgłosić ewentualne usterki działowi technicznemu.

8. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku awarii sprzętu – nie kontynuować pracy i oznaczyć urządzenie jako niesprawne.
- Odłączyć od źródła zasilania (jeśli dotyczy) i zgłosić awarię.

9. Uwagi końcowe

- Rektoskop należy konserwować i serwisować zgodnie z zaleceniami producenta.
- Niedozwolone jest stosowanie urządzenia uszkodzonego lub niekompletnego.
- Wszelkie incydenty należy zgłaszać przełożonemu lub osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pracy.