

INSTRUKCJA BHP – Waga medyczna ze wzrostomierzem

1. Przeznaczenie urządzenia

Waga medyczna ze wzrostomierzem służy do pomiaru masy ciała oraz wzrostu „pacjenta” (studenta) w placówkach medycznych, gabinetach lekarskich, przychodniach oraz innych instytucjach opieki zdrowotnej.

2. Wymagania ogólne

- Obsługiwać wagę może jedynie przeszkolony personel medyczny, techniczny lub student pod opieką lekarza lub wykwalifikowanego personelu medycznego
- Urządzenie powinno być używane zgodnie z instrukcją producenta.
- Waga musi posiadać aktualne oznaczenie legalizacji (jeśli wymagane przepisami).
- Urządzenie musi być ustawione na stabilnym, równym podłożu.

3. Przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź stan techniczny wagi oraz wzrostomierza.
- Upewnij się, że powierzchnia ważenia jest czysta i sucha.
- Zweryfikuj, czy urządzenie jest prawidłowo wypoziomowane.
- Sprawdź, czy wyświetlacz działa poprawnie i wskazuje „0” przy braku obciążenia.
- W razie jakichkolwiek uszkodzeń nie używaj urządzenia i zgłoś to przełożonemu.

4. Zasady użytkowania

- Upewnij się, że „pacjent” (student) stoi nieruchomo na środku platformy.
- W przypadku pomiaru wzrostu – przesunąć wzrostomierz do odpowiedniej pozycji i odczytać wartość zgodnie z zasadami.
- Nie przeciążaj wagi powyżej dopuszczalnej nośności określonej przez producenta.
- Po zakończeniu pomiaru wyczyść powierzchnię kontaktu z ciałem pacjenta środkiem dezynfekującym.

5. Zasady bezpieczeństwa

- Nie stawiać na wagę w butach z metalowymi elementami, obuwiu roboczym lub mokrych podeszwach.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł wody.
- Chronić urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami.

- Utrzymywać urządzenie w czystości.

6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie uszkodzenia mechanicznego, elektrycznego lub braku działania – natychmiast zaprzestać użytkowania.
- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania (jeśli dotyczy).
- Powiadomić przełożonego lub dział techniczny.
- Nie podejmować samodzielnych prób naprawy.

7. Konserwacja i legalizacja

- Regularnie przeprowadzać przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zapewnić okresową legalizację wagi (zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar).
- Prowadzić dokumentację serwisową urządzenia.

Dział Ochrony Pracy i Środowiska

<http://ochronapracy.wum.edu.pl>